



COVID-19 ANTIGEN RAPID SWAB TEST voor professionals

betrouwbare uitslag - gebruiksvriendelijk - snel resultaat



De COVID-19 Antigen Rapid Swab Test biedt snelle resultaten om aan te tonen of iemand drager is van het COVID-19 virus. De test is eenvoudig te gebruiken, zeer betaalbaar en nauwkeurig. Het neusuitstrijkje geeft resultaat in 15 minuten en is uitermate geschikt voor het testen van grote groepen mensen door professionals.

De COVID-19 Antigen Rapid Swab Test is een antigeen test die aantoont of antigenen aanwezig zijn voor een actieve COVID-19 infectie. De test is ontworpen om via een neusuitstrijkje eiwitten te vinden die COVID-19 veroorzaken. De test is eenvoudig uit te voeren en geeft nauwkeurige informatie of iemand actief besmet is met het COVID-19 virus.



Wat is het voordeel van de COVID-19 Antigen Rapid Swab Test?

De COVID-19 Antigen Rapid Swab Test is eenvoudig uit te voeren en geeft nauwkeurige resultaten in 15 minuten. Dit betekent dat men direct weet of iemand actief besmet is met het COVID-19 virus. Er hoeft niet gewacht te worden tot het preparaat in het laboratorium is onderzocht.

De COVID-19 Antigen Rapid Swab Test laat zien of iemand actief besmet is met het COVID-19 virus. In tegenstelling tot een antistoffen test die aantoont of iemand het COVID-19 virus heeft gehad. Dit maakt de COVID-19 Antigen Rapid Swab Test niet alleen snel, maar ook belangrijk bij het gericht bepalen van zowel het in quarantaine plaatsen van personen, als het bijbehorende contactonderzoek.

Voor wie is de COVID-19 Antigen Rapid Swab Test geschikt?

De COVID-19 Antigen Rapid Swab Test moet altijd worden uitgevoerd door gezondheidswerkers en is geschikt om snel een grote groep mensen te testen. Denk hierbij aan het regelmatig testen van alle personen binnen een bedrijf, op scholen, ziekenhuizen, gezondheidscentra, vliegvelden en bejaarden- en verzorgingshuizen.

Hesselmans en van Willegen

Poortmolenstraat 26
133MT Almere-Buiten
Tel. 036-5290575
info@hesselmansvanwillegen.nl

Hoe betrouwbaar is de COVID-19 Antigen Rapid Swab Test?

Het is mogelijk dat de test een negatief resultaat geeft dat niet juist is. De meest voorkomende oorzaak van een zogenoemd vals negatief is te vroeg testen. Het advies bij klachten is om na 24 uur te testen. Blijven de klachten bij een negatieve uitslag, test na drie dagen nogmaals.

Inhoud

25 complete sneltests per doos.
Per test is inbegrepen: sneltester, wattenstaafje, vloeistof buffer en pipet.

Clinical Performance

Clinical Performance of SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test


Method	Results	RT-PCR		Total Results
		Negative	Positive	
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	Negative	269	1	270
	Positive	1	33	34
Total Results		270	34	304
PPA: 97.1% (83.8% - 99.9%)*		NPA: 99.6% (97.7% - 99.9%)*		OPA: 99.3% (97.5% - 99.9%)*

PPA- Positive Percent Agreement; NPA – Negative Percent Agreement; OPA – Overall Percent Agreement, *95% Confidence Intervals

The sensitivity, specificity and accuracy for SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test meet the acceptance criteria.

	Performance	95%CI
Sensitivity	97.1%	83.8%-99.9%
Specificity	99.6%	97.7%-99.9%
Accuracy	99.3%	97.5%-99.9%

Test Procedure and Interpretation

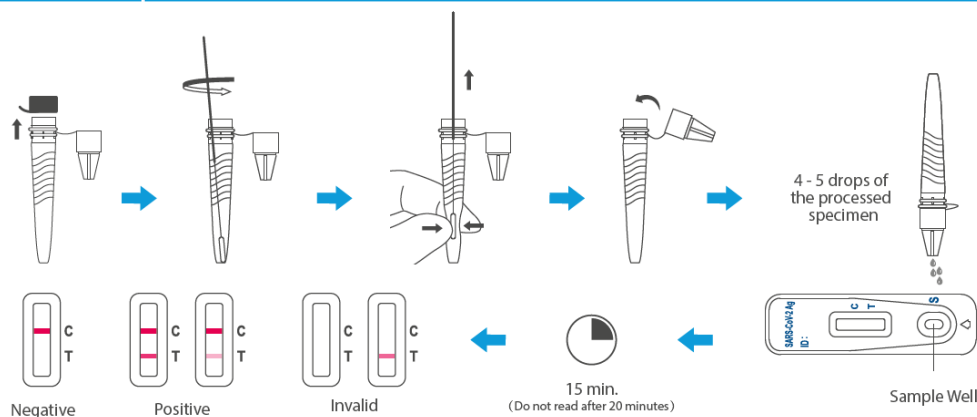

Wil je meer weten over de COVID-19 Antigen Rapid Swab Test?

Swiss Point of Care is jouw betrouwbare gezondheidspartner voor In-Vitro Diagnostiek en point-of-care-testen en biedt meetapparatuur van hoge kwaliteit die wordt gebruikt door vooraanstaande medische professionals in heel Europa.

Als je geïnteresseerd bent in het gebruik van de snelle swab test, stuur een e-mail naar info@hesselmansvanwillegen.nl en wij sturen je de informatie die je nodig hebt.